

BIREGS

B.E.A.T. LIGHT RENT



Mode d'emploi

Préface	04
----------------	----

1.0 Indication de sécurité	07
-----------------------------------	----

2.0 Caractéristiques techniques

2.1 But	08
---------	----

2.2 Programmes	08
----------------	----

2.3 Données Technique	11
-----------------------	----

2.4 Pictogrammes et symboles	11
------------------------------	----

2.5 Nettoyage et entretien	12
----------------------------	----

2.5.1 Désinfectant	12
--------------------	----

2.5.2 Consigne d'utilisation	13
------------------------------	----

3.0 Utilisation de B.E.A.T. Right Lent

3.1 Touches B.E.A.T. Light Rent	14
---------------------------------	----

3.2 Symboles d'écran B.E.A.T. Light Rent	16
--	----

3.3 Structure de menu	18
-----------------------	----

3.4 Mise en marche de B.E.A.T. Light Rent	20
---	----

3.5 Régler un programme	20
-------------------------	----

3.5.1 Allumer la radiation	22
----------------------------	----

3.5.2 Régler la durée	22
-----------------------	----

3.5.3 Régler l'intensité	24
--------------------------	----

3.5.4 Changer la langue	25
-------------------------	----

3.5.5 Afficher le numéro de série	27
-----------------------------------	----

3.5.6 Entrer des traitements	28
------------------------------	----

4.0 Service

4.1 Biregs GmbH & Co. KG	29
--------------------------	----

4.2 Contact	30
-------------	----

4.3 Recyclage et Destruction	30
------------------------------	----

Préface

Quand l'arc en ciel est entre les nuages, je veux le regarder et penser à mon lien, qui existe entre moi et toute vie sur terre. (Genesis 9,16)

Si nous étions des surhommes et si nous pouvions voir des rayons, des rayons ultraviolets et infrarouges, des micro-ondes et des ondes radio-électriques à l'œil nu, qu'est-ce que nous pourrions voir du monde et de notre corps ? Ne devrions également voir les rayons, les rayons infrarouges et ultraviolets, les micro-ondes et les ondes radioélectriques à l'intérieur des corps solides. Autrement dit, les corps solides se composent de molécules nous apparaîtront complètement transparents et toutes les ondes électromagnétiques deviendront visibles.

Imaginons donc que nous devenons ce genre de surhommes, nous verrions le monde d'une manière totalement différente.
(de Chang Lin Zhang)

Celui qui est en harmonie avec soi-même et son environnement, qui vit dans un équilibre harmonieux, devrait se sentir à l'aise. Un des plus importants facteurs de notre société d'abondance moderne est que ce projet n'est pas aussi simple. D'importants piliers d'une vie harmonieuse avec notre environnement sont la nourriture, le mouvement, le sommeil, le sentiment de satisfaction intellectuelle, spiritualité et prophylaxie. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre santé et prophylaxie. L'entreprise Biregs a développé un appareil de bien-être innovateur le B.E.A.T. Light Rent, qui vous soutient dans vos efforts à obtenir cette harmonie et surtout à la garder.

Depuis longtemps on sait en physique que tous les éléments du monde se composent d'oscillations. D'après tout ce que nous savons aujourd'hui dans les sciences, la lumière du soleil et des lampes se composent d'ondes électromagnétiques. Si nous voyons notre spectre, nous pouvons constater que notre perception sensorielle concerne uniquement la lumière visible et que le domaine des ondes électromagnétiques est perçu d'une manière pitoyable.

Conseil de lecture:

L'arc en ciel invisible et la musique inaudible
(de Prof. Chang-Lin Zhang)

Car ces ondes électromagnétiques sont souvent mises en contexte avec la médecine de quanta, on utilise souvent l'expression de la lumière mélodique. Des études internationales prouvent que la lumière monochromatique (une couleur) rouge et infrarouge d'une certaine longueur d'onde stimule les enzymes de la protection anti-oxydante. De plus elle effectue une amélioration de la production de la peroxydase d'ion de gluten dans le foie. Elle stimule la production du potentiel d'action qui représente les ressources énergétiques des cellules. On a également constaté, que l'équilibre des ions de calcium est influencé d'une façon positive dans les cellules. La lumière rouge et infrarouge règle les processus d'oxydation, qui améliorent à leurs tours le métabolisme cellulaire et la synthèse de collagène aux fibroblastes, ainsi que le potentiel d'action des cellules nerveuses, neurones, qui soutiennent la production d'A .D.N. et A.R.N. dans le noyau cellulaire et qui stimulent les mitochondries et leucocytes. Les enzymes de la protection anti-oxydante, la catalase et la dismutase de superoxydant ont un maximum

d'absorption pour la lumière rouge et infrarouge. Cette forme de régulation est souvent connue sous le nom de Low-Level-Laser, qui date de l'année 1963 dans laquelle le chercheur Endre Mester de l'université Semmelweis à Budapest a publié une étude sur l'influence du Low-Level-Laser sur le tissu. Peu de gens savent qu'il y a beaucoup d'études dans ce domaine là par ex. dans les banques de données de Pubmed et Medline, qui n'arrivent pas jusqu'au consommateur final.

Comment puis-je utiliser le B.E.A.T Light Rent d'une façon utile.

Le B.E.A.T. Light Rent offre 53 programmes de régulations, qui peuvent être revus dans le chapitre des caractéristiques techniques. Le rayonnement de B.E.A.T. Light Rent peut être appliqué d'une façon locale. L'appareil est souvent utilisé en mettant sur des points d'acupuncture. Beaucoup d'utilisateur appliquent le rayonnement également sur les différents chakras.

1.0 Indication de sécurité

- **ATTENTION Source émet IR**
- **Veillez lire le mode d'emploi avant la mise en marche de l'appareil.**
- **Lors de l'utilisation un réchauffement du boîtier du bloc d'alimentation et de la surface de rayonnement est normale et sans risques.**
- **Le système ne devrait ni être couvert, ni être utiliser près d'un chauffage ou sous l'insolation directe.**
- **Ne travaillez jamais avec le B.E.A.T. Light System, si le système a un bloc d'alimentation défectueux ou un boîtier cassé.**
- **Les réparations doivent seulement être effectuées par un technicien autorisé.**
- **Protégez le B.E.A.T. Light contre l'humidité et l'eau.**

2.1 But

Le B.E.A.T. Light Rent es un appareil de bien-être qui est conçu pour le bien-être corporel.

Il travaille avec des longueur d'ondes de 650nm (lumière rouge) et de 840nm (lumière infrarouge). Cette lumière a un différent pouls selon chaque programme. Les programmes différents peuvent contribuer à l'harmonisation de votre corps.

2.2 Programmes

Vous trouvez les programmes différents sur la liste suivante. Il faut faire attention au fait qu'on a de différente forme de régulation: entraver, stimuler, détendre, stabiliser

Nous vous prions de ne pas considérer les programmes comme des programme statiques. Soyez créatif avec votre B.E.A.T. Light Rent. Essayez de trouver les programmes et intensités qui vous conviennent le plus. Chaque être humain réagit différemment.

On vous invite à vous enregistrer sur notre site internet <http://www.biregs.com>

pour y consulter les rapports d'expérience. Nous sommes également ravis si vous nous transmettez vos propres expériences, qui mènent toujours à une amélioration du produit ou qui peuvent toujours aider d'autres thérapeutes.

No	Programme	No	Programme
1	Réduire Tension Musculaire	15	Stimuler Métabolisme Cellulaire
2	Stimuler Tissus musculaires	16	Équilibrer Tension artérielle
3	Stimuler Croissance Musculaire	17	Stimuler Capacité régénératrice
4	Stimuler Tonus Musculaire	18	Stimuler Sécrétion Endorphine
5	Détendre Tension Migraine	19	Réduire Polyneuropathie
6	Détendre Muscles Oculaires	20	Stimuler Production sérotonine
7	Stimuler Coordination Muscles oculaires	21	Réduire Douleurs aiguës
8	Favoriser Apaisement Sommeil	22	Réduire Migraines
9	Réduire Douleur Chronique	23	Stimuler Centre régulateur de la parole
10	Stimuler Mémoire à long terme	24	Restreindre Douleur sévère
11	Stimuler Mémoire à court terme	25	Réduire Douleur modérée
12	Stimuler Capacité cognitive	26	Réduire Douleur chronique
13	Réduire Trouble Sommeil	27	Réduire Addictions sévères
14	Relaxer Tension mentale	28	Réduire Addictions chroniques

Nr	Programme	Nr	Programme
29	Equilibrer Rythme cardiaque	43	Réduire Infections Bégnines
30	Equilibrer Rate	44	Réduire Réactions Allergiques
31	Equilibrer Vésicule biliaire	45	Réduire Inflammation
32	Equilibrer Reins	46	Equilibrer Bactériostase Long terme
33	Stimuler Métabolisme cellulaire	47	Equilibrer Bactériostase Moyen terme
34	Equilibrer Métabolisme cellulaire	48	Equilibrer Bactériostase Sévère
35	Réduire Infect. Otorhino (ORL) chroniques	49	Stimuler Force vitale
36	Stimuler Processus cognitif	50	Réduire Réactions Allergiques
37	Réduire infect. Otorhino (ORL) sévères	51	Stimuler système Immunitaire à long terme
38	Stimuler Cicatrisation	52	Stimuler Régénération Osseuse
39	Stimuler Apport oxygène	53	Réduire Stress physique
40	Equilibrer Système Immunitaire		
41	Réduire Infections Otorhino (ORL)		
42	Réduire Infections graves		

2.3 Données techniques

Tension	+24V DC
Courant	max. 0,3 A
Poids en g (gramme)	215 g (sans bloc d'alimentation)
Mesures en mm (longueur x largeur x hauteur)	145 x 85 x 20
Matériel du boîtier	PETG transparent PVC- dur, blanc
Classe de protection	II
DEls rouge (nm)	645
DEls infrarouge (nm)	850

2.4 Pictogrammes et symboles



Veillez suivre le mode d'emploi.



L'appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères.



ATTENTION:
Source émet IR

SN

Numéro de série

CE

Signe -CE

2.5 Nettoyage et entretien

Le B.E.A.T. Light Rent ne doit pas être nettoyé avec de l'alcool ou des solutions alcooliques!

Le B.E.A.T. Light Rent ne doit uniquement être ouvert et réparé par des techniciens de l'entreprise Biregs GmbH&Co. KG.

2.5.1 Désinfectant

Pour le nettoyage du système B.E.A.T. Light Rent le désinfectant suivant a été testé et mis en circulation:

- **mikrozyd® sensitive liquid de l'entreprise Schülke & Mayr GmbH**
- **mikrozyd® sensitive wipes de l'entreprise Schülke & Mayr GmbH**

Ces produits sont des préparations rapides désinfectants pour des surfaces sensibles avec un bon effet rapide.

2.5.2 Consigne d'utilisation

En utilisant les désinfectants il est conseillé de porter des gants de protection (en caoutchouc par ex.)

Utilisez le désinfectant d'une façon assurée et lisez toujours le mode d'emploi et la désignation avant de l'utiliser.

Le désinfectant **mikrozyd® sensitive liquid** est une solution prête à l'emploi. Mettez la en état pur sur les objets et surfaces et laissez la agir. Faites attention à ce que tout soit mouillé.


Nettoyez ce qu'il en a en trop du désinfectant avec un serviette jetable.

Avec le produit **mikrozyd® sensitive wipes** il faut bien nettoyer les surfaces avec un torchon trompé et faire attention à ce qu'elles soient complètement mouillées et laissez le agir. S'il s'agit de grandes surfaces utilisez plusieurs torchons.

Lors du nettoyage il faut faire attention à ce qu'aucun liquide rentre dans le boîtier.

Les produits peuvent être acheté chez l'entreprise Biregs GmbH & Co.KG ou chez votre distributeur.

3.1 Touches B.E.A.T. Light Rent

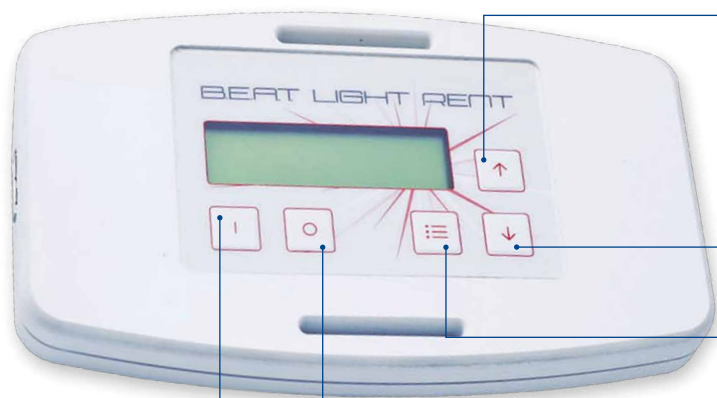

• Allumer

En appuyant sur la touche d'allumage pendant environ 3 secondes le traitement choisi sur l'écran est activé.

• Sélection „monter“

Avec la touche „monter“ vous pouvez aller vers le haut dans votre choix au menu „paramètres“, „programmes“ et „langues“.

• Sélection „descendre“

Avec la touche „descendre“ vous pouvez aller vers le bas dans votre choix au menu „paramètres“, „programmes“ et „langues“.

• Menu

En appuyant sur la touche „menu“ pendant environ 3 secondes vous arriverez au menu du système B.E.A.T. Light Rent, pour y pouvoir régler le programme que vous souhaitez appliquer, l'intensité, la durée et la langue.

• Éteindre/Arrêter

En appuyant sur la touche „éteindre“ pendant environ 3 secondes le système B.E.A.T. Light Rent est éteint.

Si vous avez fait une erreur d'entrée des paramètres dans le système, que vous ne voulez pas appliquer, vous pouvez arrêter le processus en appuyant courtement sur la touche „éteindre“ et vous retournez ensuite aux paramètres de base.

3.2 Symboles d'écran B.E.A.T. Light Rent



100%

L'intensité indique l'intensité de la radiation émise par les DELs.



75%

Chaque organisme humain réagit différemment sur la radiothérapie avec de la lumière. Pour des gens extrêmement sensibles il suffit 25% de la radiation pour atteindre l'effet souhaité. Vous devriez choisir l'intensité qui vous convient le plus.



50%

L'intensité peut être réglé dans le menu en étapes de 25%.



25%

Durée

0:01

1 minute

La durée indique le temps, pendant lequel le système B.E.A.T. Light Rent émet la lumière par le programme choisi.

0:20

20 minutes

Après l'écoulement du temps, la radiation choisie est automatiquement arrêtée.

La durée peut être réglée dans le menu sous durée en étape d'une minute.

La durée maximale est 20 minutes.



Mode programme

Modes B.E.A.T. Light

Dans le mode programme tous les programmes du système B.E.A.T. Light Rent sont affichés et peuvent être choisis par l'utilisateur lui-même.



Mode clé USB

Dans le mode clé USB uniquement le programme enregistré sur la clé USB B.E.A.T. est mise en marche sur le système de B.E.A.T. Light Rent. Une propre choix de programme comme au mode programme n'est pas possible.



Lire la clé USB

Le symbole affiche la lecture des programmes dans le système B.E.A.T. Light Rent.




Erreur ou problème

Erreur B.E.A.T. Light Rent

Ce symbole indique qu'il y a une erreur ou un problème au système B.E.A.T. Light Rent. Contactez le soutien du B.E.A.T. Light Rent.

3.3 Structure de menu

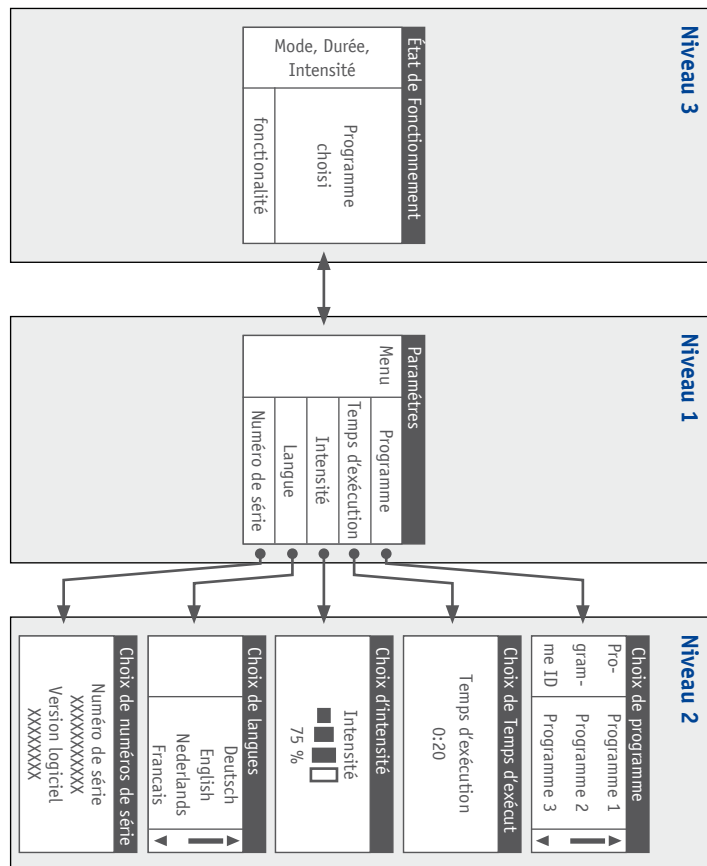

Niveau 1 / Paramètres

Menu pour les paramètres de B.E.A.T. Light Rent

Dans les paramètres de B.E.A.T. Light Rent des configurations de bases comme le numéro de série ou les langues du système B.E.A.T. Light Rent peuvent être changés.

De plus vous pouvez régler les programmes pour le traitement et leur durée, ainsi que l'intensité. Après le choix d'un de ces opérateurs vous retournez au niveau 3, pour définir les paramètres.

Niveau 2 / Sous-Menus

Choix de programme:

Ici vous pouvez choisir le programme.

Choix de temps d'exécution:

Ici vous pouvez régler la durée du programme choisi.

Choix d'intensité:

Ici vous pouvez régler l'intensité de la radiation.

Choix de langues:

Ici vous pouvez choisir la langue de système du B.E.A.T. Light Rent.

Choix de numéros de série:

Ici vous pouvez vérifier le numéro de série de votre B.E.A.T. Light Rent. De plus la version actuelle du logiciel y est enregistrée et affichée sur votre B.E.A.T. Light Rent.

Niveau 3 / État de Fonctionnement

Vue d'ensemble des paramètres de traitement

Le programme choisi, le mode du B.E.A.T. Light Rent, l'intensité choisie pour le programme et la durée restant sont affichés dans la fenêtre de l'état de fonctionnement. Si la radiation est active, il y a un point en bas de l'écran qui va de gauche à droite.


3.4 Mise en marche de B.E.A.T. Light Rent







Pour mettre en marche le B.E.A.T. Light Rent, il faut mettre la fiche dans une prise.

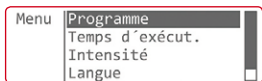
Une fois que vous avez branché le B.E.A.T. Light Rent le logo du distributeur apparaît sur l'écran pour environ 5 secondes. Ensuite vous avez la possibilité de faire fonctionner le système avec les touches.

3.5 Régler un programme






Pour régler un programme, appuyez sur la touche menu  pendant environ trois secondes.

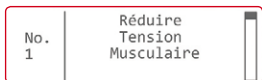

Ici vous arrivez dans le menu principal du B.E.A.T. Light Rent. Choisissez le point „Programme“ dans le menu avec les touches  ou  Confirmez votre choix avec la touche menu .

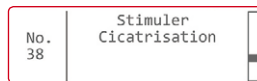



C'est ainsi que vous arrivez à la barre de sélection pour les programmes.





Choisissez ici votre programme de traitement souhaité avec les touches  ou  par exemple le programme N°38 „Stimuler Cicatrisation“.


Conseil: Pour pouvoir changer plus rapidement entre les programmes, vous pouvez également appuyer longtemps sur les  ou  grâce à cela les programmes avancent plus vite.

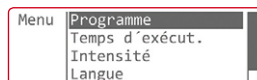

Avec la touche menu  vous enregistrez vos paramètres et vous retournez ensuite au menu principal. Ici vous pouvez faire d'autres changements.

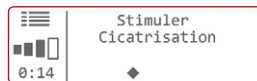


Avec la touche d'allumage  vous commencez votre programme choisi avec les changements effectués, et l'écran de l'état de fonctionnement vous est affiché. Ici il y a un point en bas de l'écran qui va de gauche à droite.

En appuyant sur la touche “éteindre” vous pouvez arrêter le processus et vous retournez aux paramètres de bases et sans changement à l'écran de l'état de fonctionnement.  Si vous ne faites pas d'autres choix ou quoi que ce soit après 30 secondes, le dernier choix est confirmé et vous retournez automatiquement à l'écran de fonctionnement avec les nouveaux paramètres.

3.5.1 Allumer la radiation




Pour mettre en marche la radiation ou la redémarrer après la fin de la durée choisie vous appuyez sur la touche . Vous verrez ensuite le logo du distributeur.

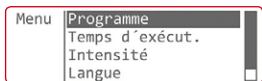

Après 5 secondes vous arrivez au menu des paramètres de programmes, durées, intensités etc. Ici vous pouvez effectuer d'autres paramètres.

3.5.2 Régler la durée

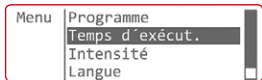


Pour changer la durée, appuyez sur la touche menu . Ici vous arriverez au menu principal du B.E.A.T. Light Rent.

Choisissez ici le point de menu „Temps d'exécut.“ avec les touches ou . Confirmez votre choix avec la touche menu .




Vous arriverez à la barre de sélection pour la durée.

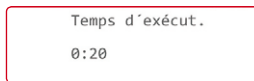

Ici vous pouvez augmenter ou diminuer la durée pour une minute à chaque fois avec les touches ou jusqu'à ce que vous avez trouvé votre durée préférée. La durée maximale est de 20 minutes.


Avec la touche menu vous enregistrez vos paramètres et vous retournez au menu principal. Ici vous pouvez faire d'autres changements.

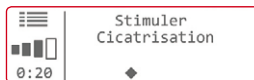





Avec la touche d'allumage vous mettez en marche le programme choisi avec les paramètres effectués et vous verrez l'écran de l'état de fonctionnement. En bas de l'écran il y a maintenant un point qui va de gauche à droite.

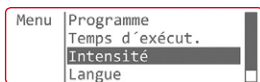En appuyant sur la touche "éteindre" vous pouvez arrêter le processus et vous retournez aux paramètres de bases et sans changement à l'écran de l'état de fonctionnement. Si vous ne faites pas d'autres choix ou quoi que ce soit après 30 secondes, le dernier choix est confirmé et vous retournez automatiquement à l'écran de fonctionnement avec les nouveaux paramètres.



3.5.3 Régler l'intensité





Pour changer l'intensité de la radiation vous appuyez sur la touche menu . Vous arrivez au menu principal du B.E.A.T. Light Rent.


Choisissez le point de menu „Intensité“ avec les touches  ou . Confirmez votre choix avec la touche menu .


Vous arrivez maintenant à la barre de sélection des intensités.


Ici vous pouvez augmenter ou diminuer votre intensité souhaitée de 25% chaque fois avec les touches  ou .

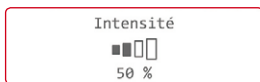


Avec la touche menu  vous enregistrez vos paramètres et vous retournez au menu principal. Ici vous pouvez faire d'autres changements.



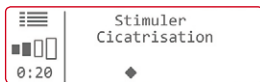

Avec la touche d'allumage  vous mettez en marche le programme choisi avec les paramètres effectués et vous verrez l'écran de l'état de fonctionnement. En bas de l'écran il y a maintenant un point qui va de gauche à droite.




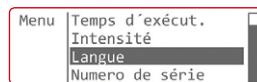

En appuyant sur la touche “éteindre” vous pouvez arrêter le processus et vous retournez aux paramètres de bases et sans changement à l'écran de l'état de fonctionnement.  Si vous ne faites pas d'autres choix ou quoi que ce soit après 30 secondes, le dernier choix est confirmé et vous retournez automatiquement à l'écran de fonctionnement avec les nouveaux paramètres.


3.5.4 Changer la langue

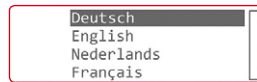



Pour changer la langue de système du B.E.A.T. Light Rent, appuyez sur la touche menu . Vous arrivez ensuite dans le menu principal du B.E.A.T. Light Rent. Choisissez le point de menu „Langue“ avec les touches  ou . Confirmez votre choix avec la touche menu .




Vous arrivez maintenant à la barre de sélection de langues. Ici vous pouvez choisir votre langue de système désirée avec les touches  ou .


Avec la touche menu  vous enregistrez vos paramètres et vous retournez au menu principal. Ici vous pouvez faire d'autres changements.

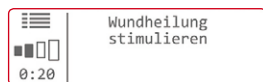






Avec la touche d'allumage  vous mettez en marche le programme choisi avec les paramètres effectués et vous verrez l'écran de l'état de fonctionnement. En bas de l'écran il y a maintenant un point qui va de gauche à droite.

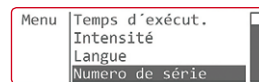En appuyant sur la touche „éteindre“ vous pouvez arrêter le processus et vous retournez aux paramètres de bases et sans changement à l'écran de l'état de fonctionnement.  Si vous ne faites pas d'autres choix ou quoi que ce soit après 30 secondes, le dernier choix est confirmé et vous retournez automatiquement à l'écran de fonctionnement avec les nouveaux paramètres.


3.5.5 Afficher le numéro de série



Pour vérifier le numéro de série de votre B.E.A.T. Light Rent, appuyez sur la touche menu  Ici vous arrivez dans le menu principale du B.E.A.T. Light Rent. Choisissez le point de menu „Numéro de série“ avec les touches  ou . Confirmez votre choix avec la touche menu .

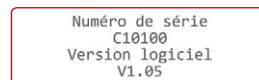

Vous voyez maintenant affiché sur l'écran le numéro de série et la version actuelle du logiciel de votre système B.E.A.T. Light Rent.

En appuyant sur la touche „éteindre“  vous retournez à l'écran de l'état de fonctionnement.

3.5.6 Entrer des traitements




Pour entrer des traitements dans le B.E.A.T. Light Rent par lecture directe il vous faut une clé USB: Sur la clé vous pouvez enregistrer les traitements du thérapeute, qui peuvent être entrés dans la clé USB à partir des programmes choisies dans son Professional System (Protolight Pro).



Pour entrer le traitement du thérapeute vous procédez ainsi:
Branchez la clé USB avec le traitement de votre thérapeute au B.E.A.T. Light Rent.




Branchez la fiche du B.E.A.T. Light Rent dans la prise. Maintenant le traitement de la clé B.E.A.T. Light est entrée dans le B.E.A.T. Light Rent.

Pendant cela le symbole suivant est affiché sur l'écran: 

Une fois que l'entrée du traitement est terminée avec succès, le traitement commence automatiquement avec les prescriptions du thérapeute.

4.1 Biregs GmbH & Co. KG

Depuis l'année 2000 l'entreprise BIREGS s'occupe de la vente de systèmes bioénergétiques et du conseil et de la formation de ses clients. BIREGS dispose entre-temps des certifications de qualification pour la vente et la production des systèmes de réactions biologiques.

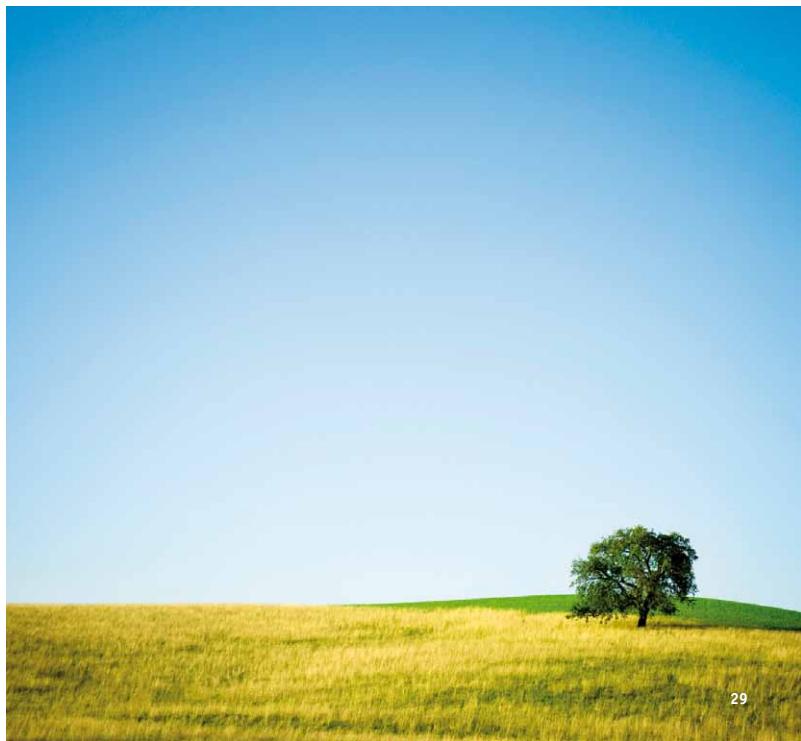

4.2 Contact

Entreprise Biregs GmbH&Co.KG
Oberurseler Str. 70
61440 Oberursel
Allemagne

Téléphone: +49 (0) 6171 583301

Télécopie: +49 (0) 6171 583302

E-Mail: info@biregs.com

Internet: <http://www.biregs.com>

4.3 Recyclage et Destruction

La destruction des appareils et des accessoires peut uniquement être faite par le fabricant. C'est pour cela que tous les appareils et tous les accessoires doivent être renvoyés au fabricant, pour que celui-ci puisse les détruire selon les règles de l'art.

Distribué en France par



+33 (0)4 93 12 16 93
info@xedestore.com
www.xedestore.com



BIREGS

Fabricant: BIREGS GmbH & Co. KG
Oberurseler Strasse 70 • 61440 Oberursel (Allemagne)